

No. 1900

トヨセフ

ソフト耳栓

取扱説明書

【発売元】 株式会社トヨセフ
兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

日本聴力保護研究会会員
東洋物産工業株式会社

■この度は当社製ソフト耳栓をお買い上げ頂き、お礼申し上げます。ソフト耳栓を使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用して下さい。

【この説明書は読んだあとも大切に保管して下さい。】

■疑問や不明な点がございましたら、上記の当社消費者相談室までご連絡下さい。

■この説明書を紛失した場合も同室までご請求下さい。

【挿入方法】

耳栓を挿入する時は、ロール状に細くし、入れる耳と反対側の手で耳を引っ張り上げ、耳の穴をまっすぐにしてから耳栓をゆっくと挿入して下さい。



! 注意

- ソフト耳栓は必ず清潔な手で取扱って下さい。
- ロール状に丸める際、強くねじらないで下さい。
※破損することもあります。
- 衛生面を考慮し、洗って再使用しないで下さい。
- ソフト耳栓は騒音防止専用です。防水用(水泳,入浴等)として使用しないで下さい。
- 耳に異状を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。

ANSI S3.19-1974

波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
遮音値(dB)	33.9	37.7	39.8	38.5	37.0	41.9	42.7	45.5	44.6	29
標準偏差(dB)	4.7	5.5	5.6	4.8	3.1	3.8	3.4	4.0	3.4	

★NRR(ノイズ・リダクションレーティング)とは……

遮音性を分かり易くする為、EPA(米国環境保護庁)が査定したものの、数値が大きい耳栓ほど高い遮音性能を持っています。

AEF-Ⓐ