

N95マスク取扱説明書

TOYO No.1795 (区分:N95)

米国NIOSH規格合格番号:TC-84A-5203

【発売元】 株式会社 ト・ヨ・セフティ
兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

東洋物産工業株式会社

- この度は当社製N95マスクをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。
N95マスクを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用して下さい。
【この説明書は読んだあと大切に保管して下さい。】
- 疑問や不明な点がございましたら上記の当社消費者相談室までご連絡下さい。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求下さい。

【使用範囲】

本品は、米国のNIOSH規格の区分N95に合格しています。
環境空気中の有害な粒子状物質から人体を守るために使用するマスクです。

危険:日本の国家検定を受検していませんので、粉じん障害防止規則及び有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では絶対に使用しないで下さい。

⚠ 危険

マスクを安全にお使いいただくために、下記の使用範囲を絶対にお守り下さい。使用範囲を守らないと、死亡もしくは重症に至る可能性が高くなります。

- ①酸素濃度が19.5%未満の環境下では、酸素欠乏のため死亡または酸素欠乏症になりますので、絶対に使用しないで下さい。(NIOSHの規格)
特にタンク、井戸の中などでは酸素欠乏症になりやすいので注意して下さい。
- ②有毒ガス、蒸気、オイルミストが存在する環境では、絶対に使用しないで下さい。
- ③環境空気の汚染物質が不明な場所では、絶対に使用しないで下さい。
- ④放射性粉じんが発生する作業、ダイオキシン類を曝露するおそれがある作業、アスベスト作業、吹付塗装作業では絶対に使用しないで下さい。

【注意事項】

⚠ 警告

マスク本来の性能を発揮するために、下記の注意事項を絶対にお守り下さい。注意事項を守らないと、死亡もしくは重症に至る可能性が高くなります。



- ①使用者の安全と健康のために、管理者は適正な着用、取り扱い方法等について指導を行い、適正な保守、管理に当たらせて下さい。
- ②使用前に本品が使用用途に適合しているか、確認して下さい。
- ③漏れが生じるので、タオルなどを当てた上からマスクを着用しないで下さい。
また、ひげ、もみあげ、毛髪等がマスクと顔面の間に入り込んだ状態で使用しても漏れが発生します。
- ④面体や部品が変形しますので高温や高熱作業場所での使用は避けて下さい。
- ⑤息が苦しくなった時、粉じんの流入を感じた時、アレルギー等で皮膚に異常を感じた時、部品が破損した時は、直ちに作業を中止し安全な場所でマスクを外して下さい。
- ⑥面体に付着した粉じん等の除去のために、水洗いする、強く叩く、エアで吹く等必要以上の力を加える行為は絶対にしないで下さい。(面体が損傷し、性能が発揮できません。)
- ⑦面体は乾燥状態で使用して下さい。
- ⑧改造は絶対しないで下さい。
- ⑨マスクを休憩等の理由により外す場合、マスク内側に粉じんが付着しないように保管して下さい。

【着用前の点検】

下記のような点に異常が認められた場合は、新しいマスクと交換して下さい。

- ①マスク各部に亀裂、穴あき、または、著しい変形等がある。
- ②マスクに著しく粉じんが付着している。
- ③しめひもの弾性が十分に保たれていない。

【装着方法】

①ノーズピースを上にし、マスクを顔に当てて下さい。	
②下側のしめひもを首の後ろに掛け、上側のしめひもを頭部上方に掛けて下さい。	
③ノーズピースが鼻に密着するように、指で押し曲げて下さい。	
④両手でマスク全体を覆い、息を吐き、空気の漏れを確認して下さい。 空気の漏れがある場合はマスクを動かし、再度空気の漏れを確認して下さい。	

【保管方法】

未使用のマスクは乾燥した清潔な冷暗所に保管して下さい。

【廃棄方法】

マスクに付着した有害物質が再飛散しないように袋等に詰めて破棄して下さい。