

No.1072

LUMBAR BELT  
**腰椎ベルト**


腰痛は腹筋及び背筋の能力が低下し、脊椎の支えが弱くなることから起こります。

- 立ったまま、座ったままでの長時間の作業に!
- 長時間の車の運転に!
- 重い荷物を運ぶときに!



- 軽量なので、付けているのが気にならないう。
- スプリング止めテープ④の使用により肌着やズボンの上からでもヒタタリフィットします。
- 補助ゴム⑤によりウエストの引き締め強さを好みに合わせて調節できます。
- 薄地(ウレタン)②使用で、弾力性と通気性を確保しています。
- 腰部に添ったホーン(弾力性のあるプラスチック板)①が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くします。

■製品の特長

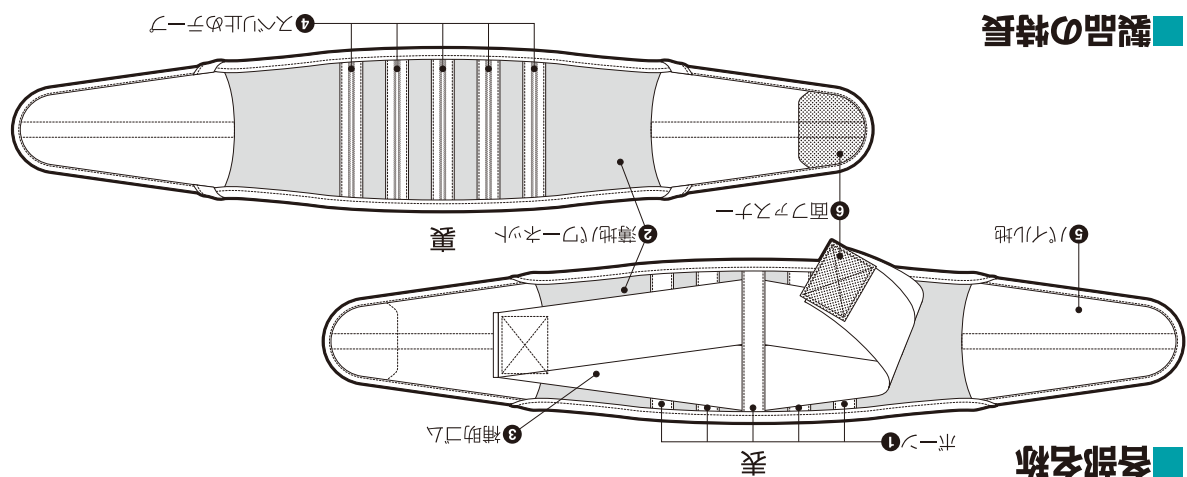


■各部名称


- この度は当社製腰椎ベルトをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。
- ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後まで読んで頂き、充分で理解の上使用してください。
- この取扱説明書は読んで後も大切に保管してください。
- 疑問や不明な点がございましたら、裏面の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この取扱説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。

取扱説明書

■装着方法

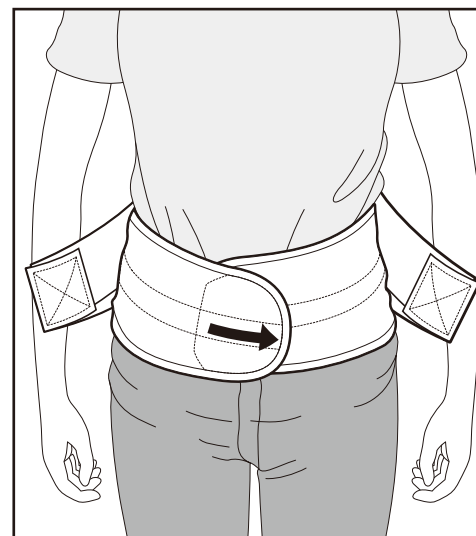

①ベルトの両側を持ち、伸縮度を調節しながら圧迫感の良いところで面ファスナーを止めてください。

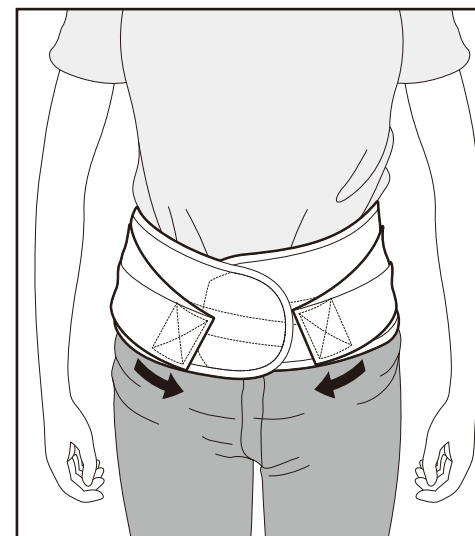

②さらに補助ゴムを引っ張り、ウエストへの引き締め強さを調節し、好みのフィット感にしてください。(補助ゴムを下腹部の方向に引っ張る方が効果的です)

※肌着や作業衣(ズボン)の上に装着してください。肌の上に直接装着すると伸縮時の摩擦により、肌を傷付ける恐れがあります。

⚠ 警告

- この腰椎ベルトは腰部の保護用です。それ以外の用途には使用しないでください。
- この腰椎ベルトを分解、改造等は、絶対にしないでください。
- この腰椎ベルトは腰痛等の治療用具ではありません。腰椎を保護し、腰に負担をかけないための予防、保護用腰部固定ベルトです。

⚠ 注意

- 高温(50℃以上)の環境、車内及びトランクの中、炉前、ストーブの前等)になる場所での使用、保管はしないでください。
- 日光、熱、雨、薬品等の影響を受けると性能が低下する場合がありますので、それらの影響を受けない場所で使用、保管してください。
- ベルトに損傷及び異常のある物は使用しないでください。
- ウエストサイズに合ったものを使用してください。

サイズ	S	M	L	LL
ウエストサイズ	58~73cm	68~85cm	80~100cm	95~125cm

- 汚れた時は、製品に取付けてある品質表示タグをご確認の上、洗濯してください。



【発売元】 株式会社 トヨタセフティ  
 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園  
 URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>  
 消費者相談室 TEL.0794-83-0155



日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会会員  
**東洋物産工業株式会社**